

EiNZIGWARE®


**WIR NÄHEN,
WAS FEHLT!**

EiNZIGWARE näht Atemschutzmasken.

**ANLEITUNG
BEHELF-MUND-NASEN-SCHUTZ**



ANLEITUNG BEHELF-MUND-NASEN-SCHUTZ

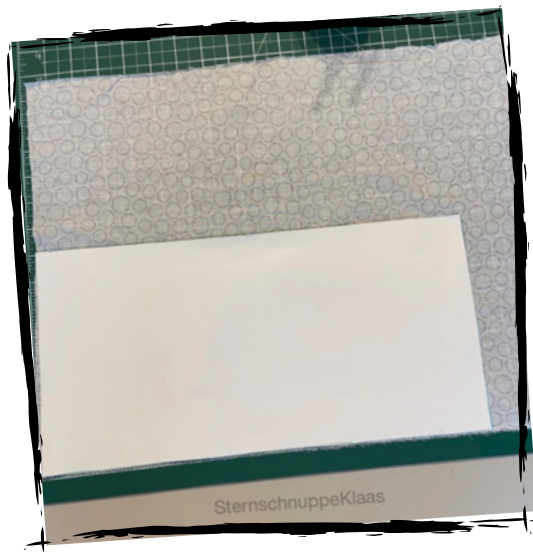

Baumwollstoff (luftdurchlässig, damit man gut atmen kann und waschbar bei 90 Grad) auf 20x40 cm zuschneiden.



Links auf Links zusammen falten und glatt bügeln.



Nun den Stoff in drei ungefähr gleiche Falten legen und mit dem Bügeleisen fixieren.



ANLEITUNG BEHELF-MUND-NASEN-SCHUTZ



Dann die festgebügelten Falten
rechts und links knappkantig
fest nähen.



Das gefälzte Schrägband oben an
den Mundschutz annähen. Dabei
das Schrägband und den Stoff
rechts auf rechts legen.



An der Unterseite des Stoffes
(Bruch) nach links umklappen und
festnähen.




ANLEITUNG BEHELF-MUND-NASEN-SCHUTZ



Anschließend den Draht in das angenähte Schrägband einlegen,
das Schrägband umklappen, fixieren und festnähen.
(alternativ auch ohne Draht möglich)

Nun zwei Schrägbänder mit je 85cm zuschneiden.
Diese zur Hälfte falten und mittig auf den Stoff fixieren.

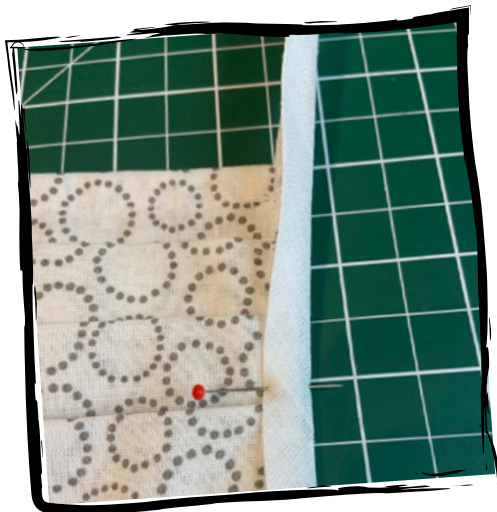

ANLEITUNG BEHELF-MUND-NASEN-SCHUTZ




Gegenüber liegende Seite das gleiche wiederholen.

Hinweis:

Unser Mundschutz wird komplett selbst gefertigt. Er ist weder geprüft noch zertifiziert.

Er bietet Alternative, wenn kein Einmal-Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung steht.

Er dient zur Reduzierung bei der Verbreitung von Tröpfchen und ist kein Schutz gegen Covid-19.

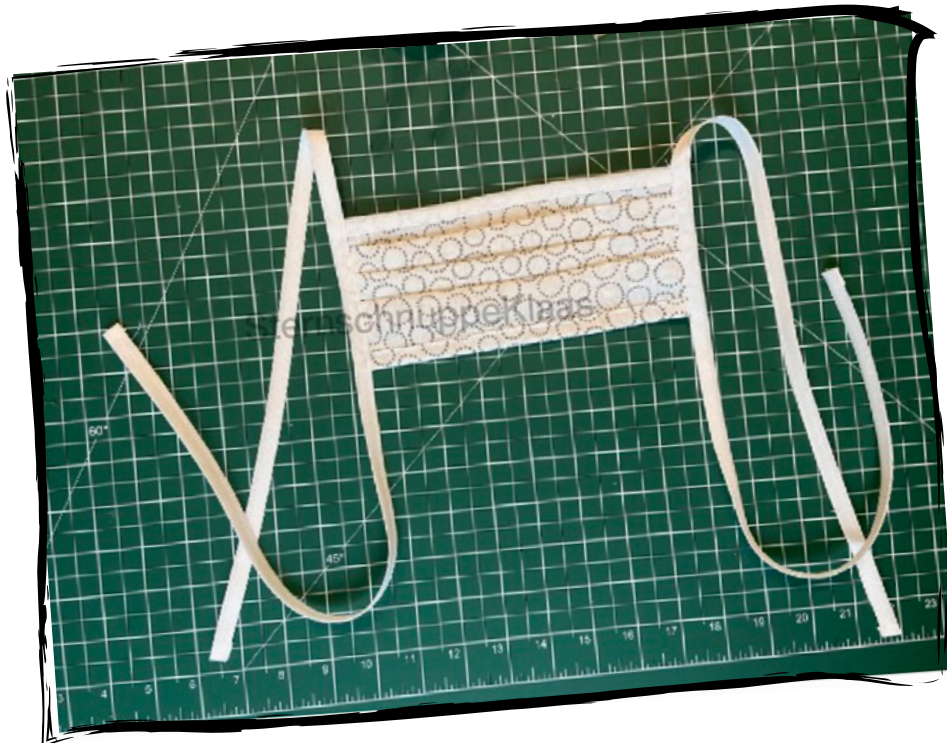

EiNZIGWARE dankt der Feuerwehr Müllheim/Baden für die Bereitstellung der Anleitung.